



ВЕЛЕС-300

ИП МОСТЕПАНОВ Станислав Анатольевич ИНН 507403444781

142143, Московская обл. Подольский р-н п. Быково, ул. Школьная 7/64

8(496)767-67-29 8(926)145-52-50 8(926)145-49-10 veles@veles-zoo.ru meliza@inbox.ru

www.veles-zoo.ru

Термостат оттаиватель для биоматериала универсальный ТО-у Велес-300 (220)

Назначение: Термостат предназначен для размораживания криоконсервированного семени быков-производителей, путем высокоскоростного оттаивания в термостабилизированной камере.

Используется для оттаивания семени:

- ❖ В международных соломинках, в т.ч. -140 мм. (до 10-12 шт. одновременно)
- ❖ В литовских полипропиленовых соломинках длиной – 100 мм (до 5-6 шт.)
- ❖ В гранулах – в стеклянных ампулах или пенициллиновых флаконах с раствором цитрата натрия (1 ампула или флакон)

ПРЕИМУЩЕСТВА данной модели:

- ✓ Быстрый нагрев и термостабилизация по всей длине столба;
- ✓ Питание термостата-оттаивателя от сети переменного тока 220 В, 50 Гц,а



Термоста-оттаиватель для размораживания криоконсервированного семени быков-производителей ОБ-3 Велес-300

Термостат предназначен для размораживания криоконсервированного семени быков-производителей, путем оттаивания в термостабилизированной камере.

В качестве нагревательного элемента использована нихромовая проволока диаметром 0,5 мм., которая распределена по всему внутреннему стакану, что обеспечивает равномерное прогревание по всей поверхности.

В центре стакана выведен высокоточный термодатчик для непосредственного измерения температуры воды.

О достижении заданной температуры сигнализирует погасание нижнего светодиода и зажигание верхнего.

- *Укомплектован КРЫШКОЙ для сохранения температуры, а так же для транспортировки размороженных пайет.
- *Снабжен датчиками температуры *Внутренней ЯРКОЙ подсветкой



Термоста-баня Water-Sprite для оттаивания криоконсервированной спермопродукции

Баня заполняется водой в объеме 350 мл. Температура воды поддерживается постоянной электронным блоком. Требуемая температура воды устанавливается переключателем на лицевой панели бани. При использовании импортных разбавителей криоконсерванта задается температура бани равной 36С, а при отечественном 39С Питание бани осуществляется через сетевой адаптер 220/12 В, 4 А или от автомобильного аккумулятора через прилагаемый шнур

Комплектация водяной бани □

- Электрическая водяная баня
- Адаптер сетевой 220/12 в,4 А.
- Шнур сетевого адаптера.
- Шнур автомобильный.
- Индикатор температуры /монитор/.
- Черпак.
- Инструкция по эксплуатации.

